



+ Massgeschneidertes Design

Die GOODWOOD Panels sind vollständig personalisierbar (Farbe, Holzton) und passen sich der Dekoration des Zimmers an.

+ Beleuchtung

Das GOODWOOD Konzept ermöglicht eine individuelle Wandleuchte pro Bett (GOODLIGHT, LYSA, LUMIA) oder eine durchgehende Leiste, in der die Lichtquellen integriert sind.




TECHNISCHE DATEN

Das architektonische Konzept GOODWOOD bietet viele Möglichkeiten für die Integration von elektrischen Komponenten und medizinischen Gasen. Dank seines schlanken Profils lässt es sich leicht in den Pflegebereich integrieren. Optional kann es auch mit 25x10 Geräteschienen ausgestattet werden.


1 Bett Konfiguration

Vorderansicht


GOODWOOD mit Wandleuchte GOODLIGHT oder LYSA

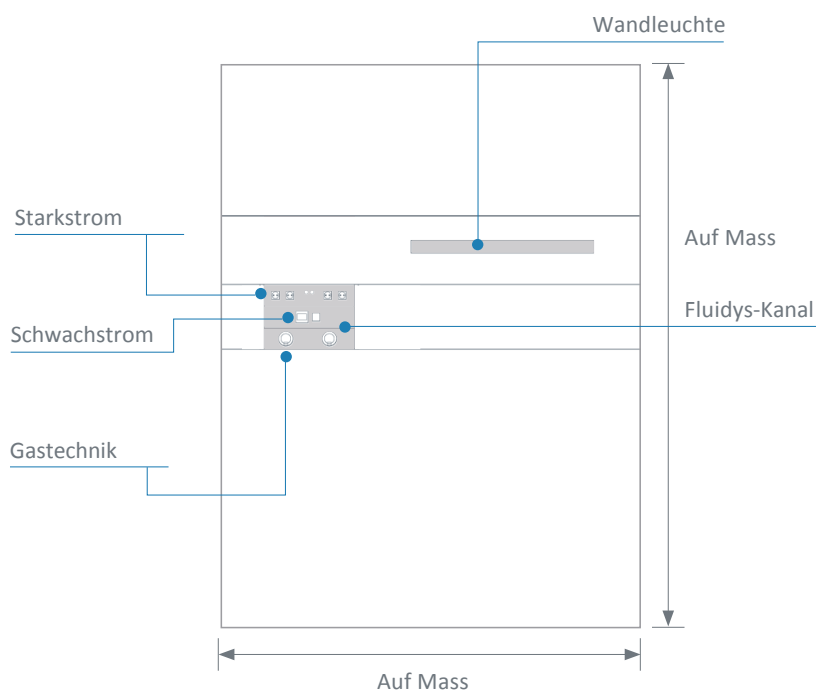


Seitenansicht

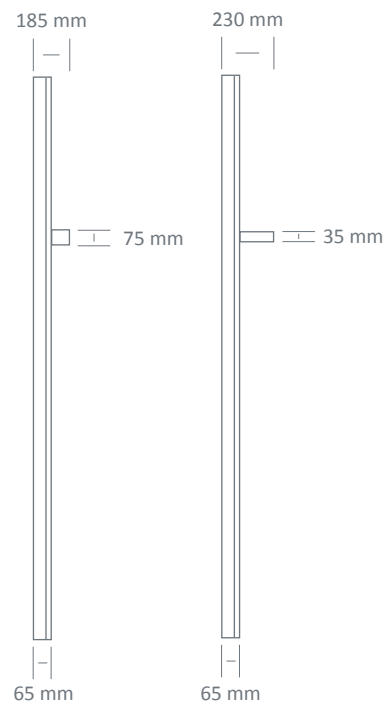


GOODWOOD mit GOODLIGHT oder LYSA

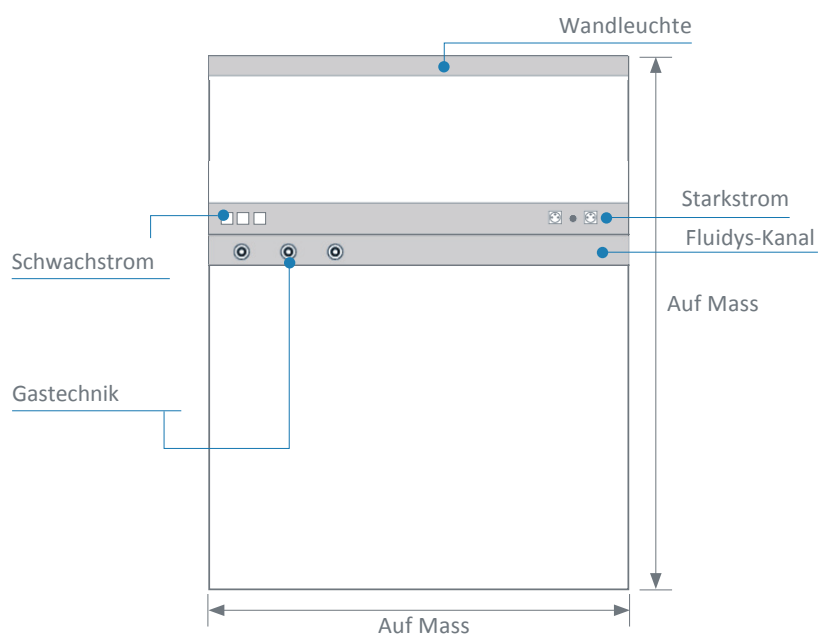

GOODLIGHT

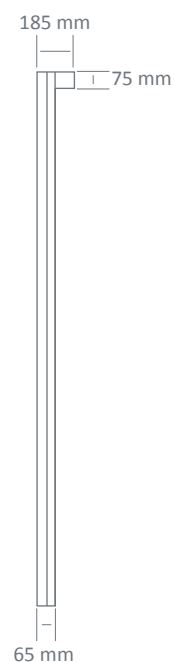


LYSA

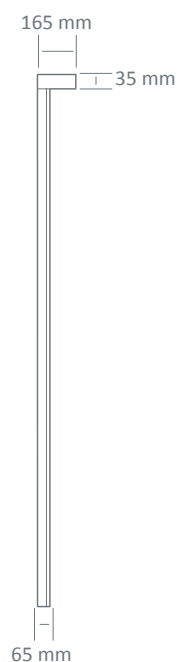


Für die verschiedenen möglichen Farbtöne und Personalisierungen siehe unsere Architektur Farbkarte auf Seite 5.

Strom-/Gasversorgung


Von der Rückwand

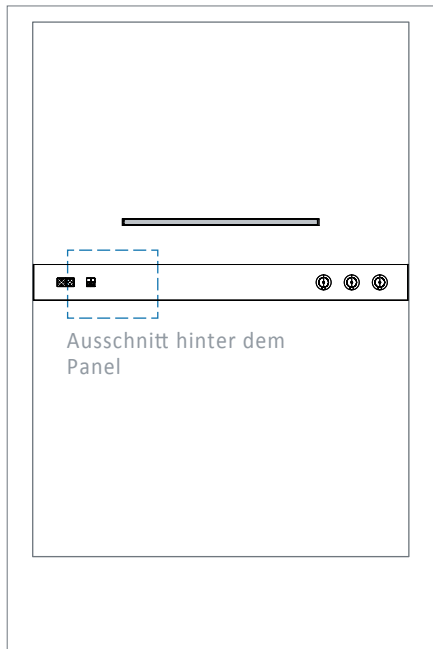

Über die Decke

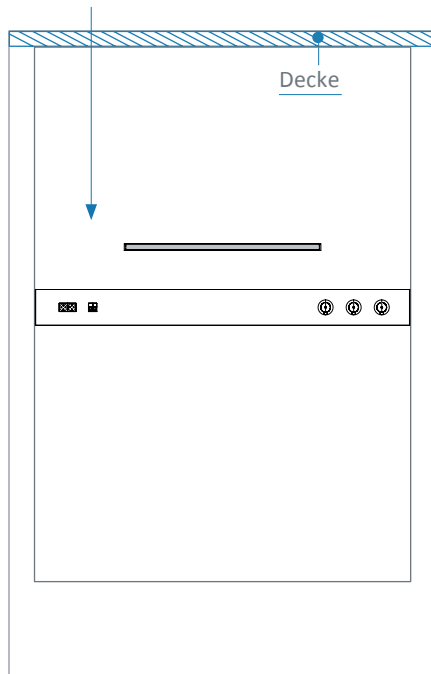

Seitlich, über einen Verteilerkanal

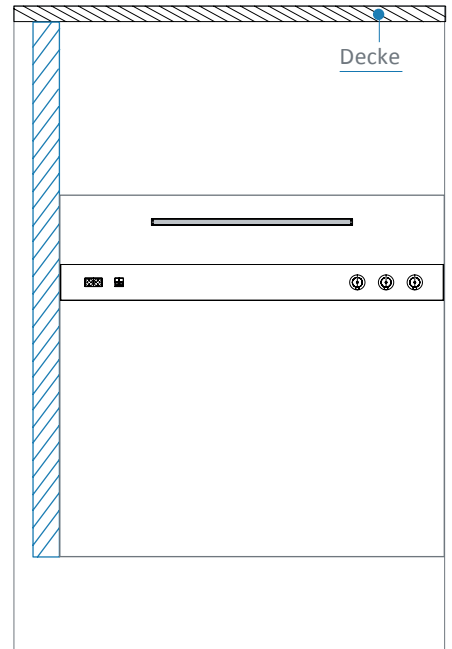

Integration von elektrischen Komponenten

Der Wasserstrahlausschnitt der AXIS-Abdeckung ermöglicht eine präzise und massgeschneiderte Verarbeitung, die die Möglichkeit bietet, jede Form von Steckdosen, Netzwerkdosen, Patientenrufe etc. zu integrieren. Die bündige Montage der elektrischen Geräte vereinfacht die Reinigung und Desinfektion.



Gehäuse für Flüssigkeiten

Einbau jeglicher auf dem Markt angebotener Fabrikate möglich.
Bspw. Heyer, Gloor, Dräger, Greggerson etc.







Standardfarben

Das architektonische Konzept GOODWOOD bietet eine breite Palette an Farben.

Alle unten aufgeführten Varianten verfügen über eine antibakterielle SANITIZED®-Behandlung.









Unifarbene Töne

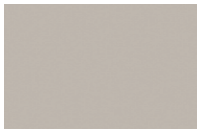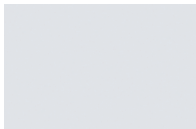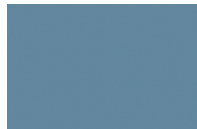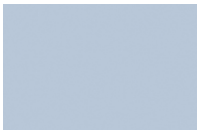					
Blau B086 Finishing : FA	Beige B116 Finishing : FA	Weiß B117 Finishing : FA	Blau B124 Finishing : FA	Blau C118 Finishing : FA	Seladon C190 Finishing : FA
					
Rauch F008 Finishing : FA	Grau G044 Finishing : FA	Orange G078 Finishing : FA	Gelb J018 Finishing : FA	Grün P092 Finishing : FA	Rose R058 Finishing : FA

Weitere Farben erhältlich auf <https://www.polyrey.com/collection/unis>

Holzdekor

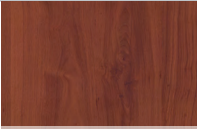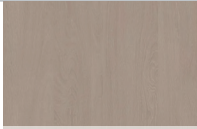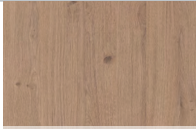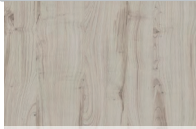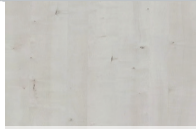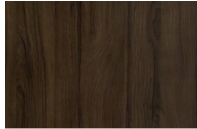					
Pekannussholz B023 Finish : FA	Gewaschene Eiche C103 Finish : SEV	Vendôme Eiche C133 Finish : SEV	Kirschbaum Natur C181 Finish : EXM	Nordischer Ahorn E028 Finish : FA	Färöer Ahorn E103 Finish : EXM
					
Esche Kristall F058 Finish : SEV	Monreale Ash F061 Finish : SEV	Esche Monreale H028 Finish : SEV	Haselnuss Natur N056 Finish : EXM	Walnuss Havana N114 Finish : EXM	Walnuss Appalachia N118 Finish : EXM

Weitere Farben erhältlich auf <https://www.polyrey.com/collection/bois>

Finish FA: Leichtes Satin-Finish mit ultrafeiner Körnung, fühlt sich weich an.

Finish EXM: Ultramatt mit rauer Haptik, die die Authentizität der Originalmaterialien wiedergibt


SEV-Finish: Die Holzfasern werden subtil von einer unregelmäßig gekörnten, seidigen Oberfläche unterstützt.

Hinweis: Die gedruckten Farben können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufspersonal, um sich unsere Muster anzusehen.

Sie können sie innerhalb von 48 Stunden erhalten.

GOODWOOD mit integriertem Aluminiumprofil

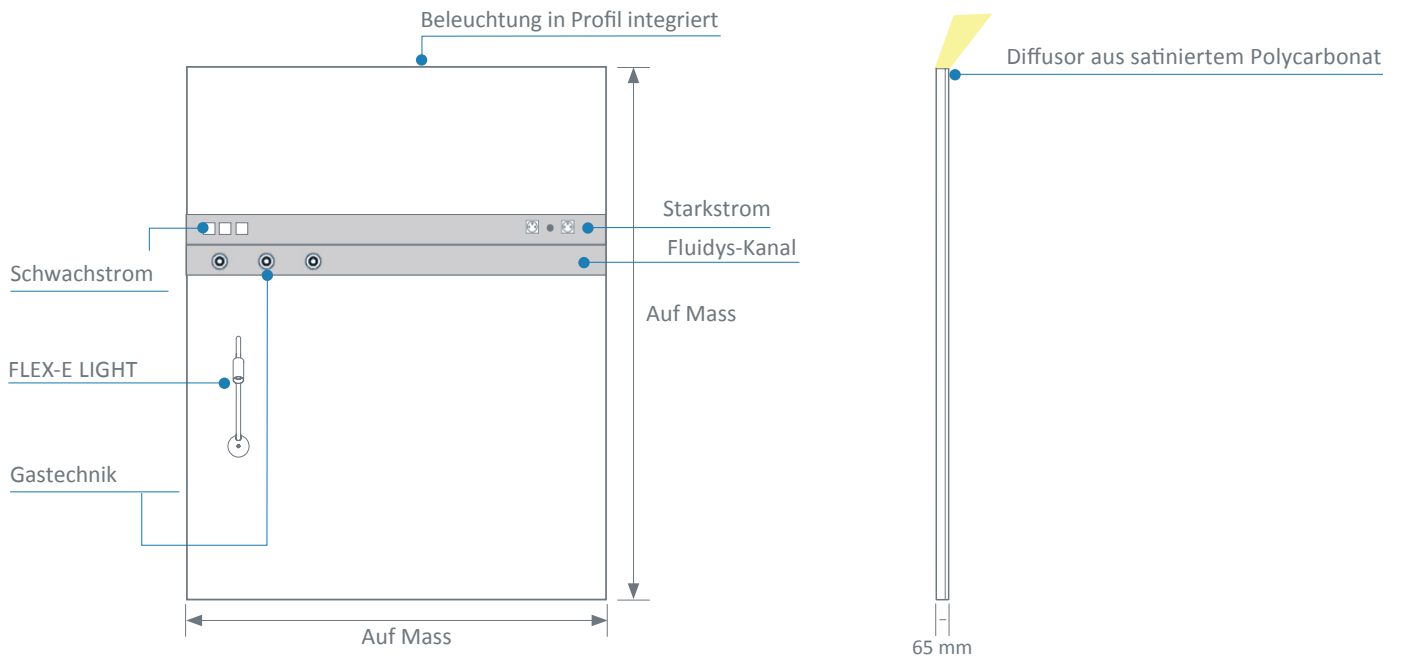

Die Farben der von TLV angebotenen Laminatpaneele finden Sie auf der Architekturfarbkarte auf Seite 5.

BEISPIELKONFIGURATIONEN



Goodwood 1 Bett mit Wandleuchte Lysa



Goodwood 1 Bett mit Wandleuchte Goodlight



Goodwood 1 Bett mit Leiste Goodlight und Tragschiene für Zubehör



Goodwood mit integrierter Beleuchtung Option RGB



Das GOODWOOD-Konzept ist mit einer GOODLIGHT-Wandleuchte an der Vorderseite oder mit einer GOODLIGHT-Leiste als Überhang an seiner Frontseite ausgestattet. Außerdem integriert es eine LED-Standby-Beleuchtung im unteren Bereich.

Leistungsstarke und kontrollierte Beleuchtung

Die Hochleistungsreflektoren der Allgemein- und Lesebeleuchtung sorgen für eine hohe Effizienz und lenken den Lichtstrom in die Mitte des Raumes und auf die Lesefläche.


Angenehme Beleuchtung

Die Blendwirkung der Umgebungs- und Lesebeleuchtung wird begrenzt, da die Lichtquellen weder für den Patienten noch für das medizinische Personal oder Besucher direkt sichtbar sind.

Allgemeinlicht


- Diffusor aus satiniertem, durchsichtigem PMMA* mit Anti-UV-Behandlung
- Aluminium-Reflektor MIRO 20 SILVER® (für LYSA und GOODLIGHT)

* PMMA : Polymethylmethacrylat

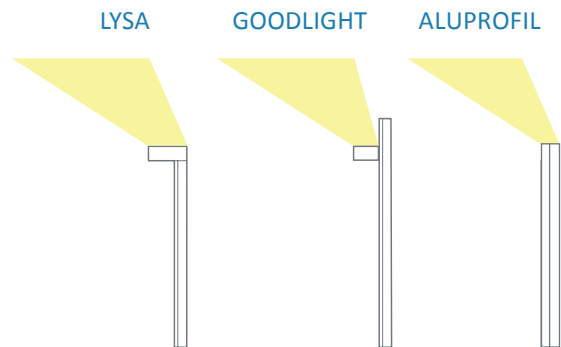


Leselicht

- Diffusor aus satiniertem Polycarbonat
- Aluminium-Reflektor MIRO 20 SILVER® (für LYSA und GOODLIGHT)

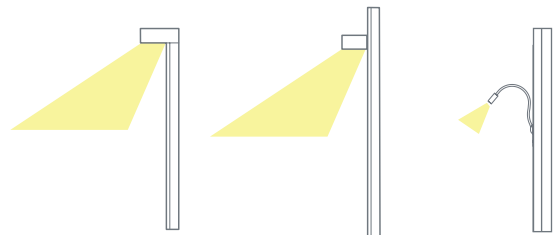

Beleuchtung für die Pflege


Die Pflegebeleuchtung kombiniert direkte Beleuchtung (Lesen) mit indirekter Beleuchtung (Allgemein)

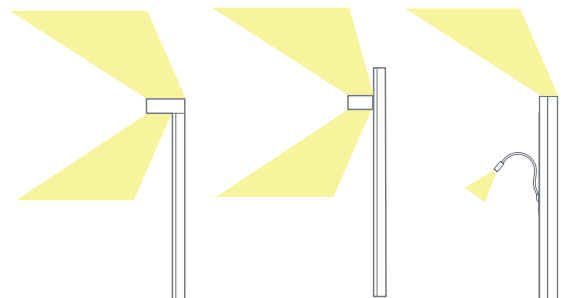

* Polymethylmethacrylat

Lichtstudie

- Zimmerart gemäss den AFE-Empfehlungen.
- Abmessungen des Raumes: 3 m x 3 m, Deckenhöhe 2,5 m
- Reflexionskoeffizient Decke: 7, Wände: 5 und Boden: 3
- Wertberichtigungskoeffizient 0,83
- Empfohlene mittlere Beleuchtungsstärke: Allgemein 100 lux, Leselicht 300 lux und Pflegelicht 300 lux

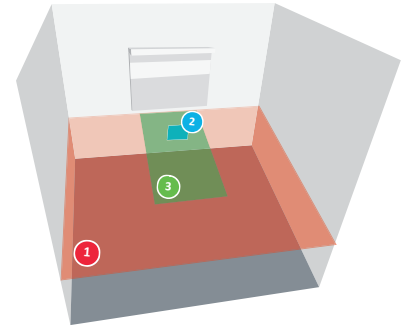


GOODLIGHT Wandleuchte

Allgemeinlicht

Virtueller Raumplan mit einer Fläche, die der des Raumes entspricht und sich 0,85 m über dem Boden befindet (3 m x 3 m bei einem Einzelzimmer).


Modul 3 ft

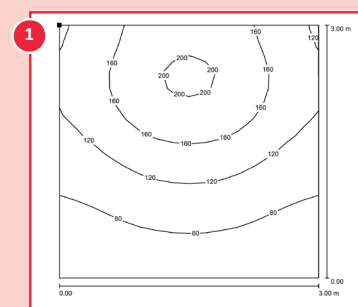

Leselicht

Virtuelle Lesefläche 0,3 m x 0,3 m, um 75° geneigt, 1,1 m vom Boden und 1 m von der Wand entfernt, an der sich die Wandleuchte befindet.


Modul 2 ft

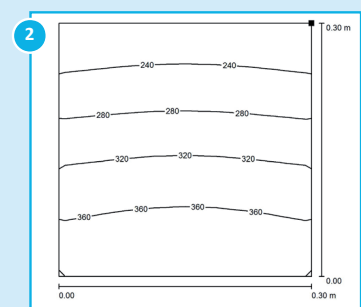

Beleuchtung für die Pflege

Virtuelle Untersuchungsfläche 2 m x 0,9 m, 0,85 m vom Boden entfernt, in der Breite zentriert und 0,1 m von der Wand entfernt.

Kombiniert Allgemein- und Leselicht

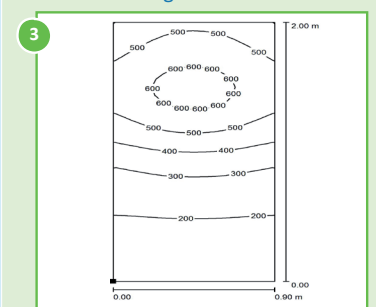

Verbrauch	33,2 W	10,8 W	44 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke:	125 lx	350 lx	379 lx

Technische Daten (LYSA oder GOODLIGHT)

Beleuchtung	Leistung LED-Module	Leuchtentyp	Lichttemperatur	Lichtstrom ⁽¹⁾	Systemleistung	System Effizienz	Treiber
Allgemeinlicht	28,7 W (3 Ft)	LED	3000 K 4000 K	5039 lm	33,2 W	151,9 lm/W	Fest / DALI
Allgemeinlicht (Beleuchtung Dynamisch)	38,9 W (3 Ft)	LED	2700 K à 6500 K	5000 lm	44,9 W	111,4 lm/W	DALI
Leselicht	8,9 W (2 Ft)	LED	3000 K 4000 K	1710 lm	10,8 W	158,8 lm/W	Fest / DALI
Nacht-/Orientierungslicht	1 x 3,1 W	LED	3000 K	335 lm	4,9 W	68,1 lm/W	Fest

⁽¹⁾ Alle in der Broschüre angegebenen Lichtströme werden aus dem Fluss der LED-Module realisiert, der auch als Systemfluss bezeichnet wird.

Lichtstrom am Ausgang der Leuchte = (Modulfluss) x (optischer Wirkungsgrad), der optische Wirkungsgrad der Leuchte ist in der Eulumdat-Datei (LDT Zeile 23) angegeben, die auf unserer Website zum Download bereitsteht oder auf Anfrage erhältlich ist.

Dynamische Beleuchtung



Die GOODLIGHT Wandleuchte verfügt über die Option Dynamische Beleuchtung. Für weitere Informationen siehe unsere Broschüre.



VERTRIEB & SERVICE IN DER SCHWEIZ



MED-INNOVA

Med-Innova AG | Tel: +41 26 323 20 30
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

Normen und Empfehlungen

- EN ISO 9001 & EN ISO 13485: Qualitätsmanagementsysteme
- CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte gemäss den Anforderungen der Richtlinie 93/42/CEE
- EN ISO 11197: Medizinische Versorgungseinheiten
- EN ISO 7396-1: Verteilersysteme für medizinische Gase - Teil 1
- AFE-Empfehlungen zur Beleuchtung in Gesundheitseinrichtungen

